

# HydroSanta® Vaginalgel

2IN1 VAGINALGEL ZUR BEFEUCHTUNG DER SCHEIDE

2in1

Mit Hyaluronsäure & Milchsäure



Lindert Symptome von Scheidentrockenheit  
(z. B. Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr)



Spendet langanhaltende Feuchtigkeit und erhält  
den natürlich sauren pH-Wert



Wirksamkeit durch klinische Studie belegt



Hormonfrei



Gynial - ein Familienunternehmen aus Österreich



Gynial = 100 % Frauengesundheit

Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wechseljahre & Intimgesundheit stehen bei uns im Fokus - denn wir von Gynial finden, dass der Gesundheit & dem Wohlbefinden der Frau besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte - und zwar in allen Lebensphasen.

Gynial GmbH | Ungargasse 37/1/4, 1030 Wien | T: +43 1 890 14 54  
F: +43 1 890 14 54-15 | E: info@gynial.com | www.gynial.com

Schick **Scheidentrockenheit**  
in die **Wüste**



Erhältlich  
in der  
Apotheke



3741V21032024

# ANWENDUNG

## HydroSanta® Vaginalgel



NACH BEDARF

0,5-2 cm Gelstrang HydroSanta®

Bei Beschwerden im Scheideneingang und im äußeren Intimbereich wird das Gel je nach Bedarf, auch mehrmals täglich, mit einem sauberen Finger aufgetragen und verteilt. Hierfür reicht ein Gelstrang von ca. 0,5 cm Länge aus. Die Anwendung in der Scheide sollte einmal täglich erfolgen. Hier sollte ein Gelstrang von ca. 2 cm Länge mit einem sauberen Finger eingeführt und in der Scheide verteilt werden.

### BEI AKUTEN SYMPTOMEN

### ZUR AUFRECHTERHALTUNG

Bei akuten Symptomen sollte eine tägliche Anwendung über 7 - 10 Tage erfolgen.

Nach Abklingen der Symptome genügt zur Aufrechterhaltung der Befeuchtung eine Anwendung jeden 3. Tag bzw. eine Anwendung bei Bedarf.

### HydroSanta® Vaginalgel\*

Inhalt: 30 ml Gel zur inneren und äußeren Anwendung  
PZN: 3389286



Neugierig?

Besuchen Sie uns unter [gynial.com](http://gynial.com) oder scannen Sie bequem den QR-Code.

\*HydroSanta® wird angewendet zur Linderung und Vorbeugung von Beschwerden durch Trockenheit in der Scheide und im äußeren Intimbereich wie Juckreiz, Brennen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Es kann in seltenen Fällen vorübergehend ein leichtes Brennen auftreten. Frei verkäufliches Medizinprodukt. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und fragen Sie erforderlichenfalls Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

# WARUM

## HydroSanta® Vaginalgel?

### HydroSanta® Vaginalgel effektiv bei Scheidentrockenheit

HydroSanta® wurde speziell entwickelt, um effektiv durch Scheidentrockenheit ausgelöste Symptome zu lindern. HydroSanta® enthält hochwertige Hyaluron- und Milchsäure. Das Gel bietet nicht nur eine langanhaltende Befeuchtung, sondern stabilisiert durch die zugesetzte Milchsäure zusätzlich den pH-Wert der Scheide.

Genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen!

Unsere Community freut sich über Zuwachs!



#meingynialesbauchgefühl